



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID 2%

GERMOCID 2% è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID 2% è una soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinfettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici. L'efficacia di GERMOCID 2%, sia come detergente che come disinfettante, in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici), consente di utilizzarlo su tutti gli strumenti odontoiatrici e/o chirurgici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (compresi HIV-HBV-HCV).



APPLICAZIONI

GERMOCID 2% è un prodotto pronto all'uso specifico per la detersione, la disinfezione e per la decontaminazione prima della sterilizzazione di strumenti chirurgici e dispositivi medici invasivi. Per uso professionale, si usa tal quale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Immergere gli strumenti da trattare nella soluzione come da tabella. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo.

Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni.

TEMPI DI CONTATTO:

Batteri	15 minuti
Fungi	15 minuti
Micobatteri	60 minuti
Virus (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	60 minuti

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
F111	Flaconi da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025509	08009110025509	335 l x 253 p x 274 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID 2%

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Benzalconio cloruro 2,0 g; O-fenilfenolo 0,2 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido incolore/verde tenue non profumato.

ATTIVITA'

GERMOCID 2% è una soluzione pronta all'uso che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante. È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus.

Norma	Attività	Tempi di contatto
EN13727-EN14561	Battericida	15 minuti
EN13624-EN14562	Fungicida	15 minuti
EN14348-EN14563	Micobattericida	60 minuti
EN14476	Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	60 minuti

VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di Classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI