

SL

**Dezinfekcijsko sredstvo, pripravljeno na uporabo  
za invazivne medicinske pripomočke  
čistilno sredstvo s kvarternimi amonijevimi solmi**

**POZOR**

**Lastnosti**

GERMOCID 2% je raztopina, pripravljena na uporabo, za čiščenje, dezinfekcijo in dekontaminacijo invazivnih medicinskih pripomočkov pred sterilizacijo z avtoklaviranjem. GERMOCID 2% širokega spektra hitro in učinkovito očisti in dezinficira proti bakterijam, glivam, mikobakterijam in virusom (Adenovirus, HIV-HBV-HCV). Priročen in enostaven za uporabo, GERMOCID 2% ni jedek, združljiv je z običajnimi komponentami, ki se uporabljajo v medicinskih ordinacijah, njegova učinkovitost pa se pri uporabi v ultrazvočnih rezervoarjih poveča. GERMOCID 2%, ki je v prisotnosti organskih snovi (kri - slina - organski izločki) visoko učinkovit in hitro delujoč tako kot razkužilo kot čistilno sredstvo, omogoča uporabo na vseh medicinskih, zobozdravstvenih, kirurških in estetskih instrumentih. Odstranjevanje nečistoč ne zahteva mehanskega delovanja.

**Način uporabe:** Uporablja se v nerazredčeni obliki. Instrumente, ki jih želite obdelati, potopite v raztopino glede na stopnjo dezinfekcije, ki jo želite doseči, in želeni čas stika. Pred uporabo instrumente sperite veliko količino vode. Raztopina ostane učinkovita do največ 24 ur. **Časi stika:** 15 minut proti bakterijam in glivicam; 60 minut proti mikrobakterijam in virusom.

**Sestava:** 100,0 g izdelka vsebuje: Benzalkonjev klorid 2,0 g; ortofenilfenol 0,2 g; pomožne snovi; prečiščena voda po potrebi do 100,0 g.

**Opozorila:** H319 Povzroča hudo draženje oči. H315 Povzroča draženje kože. **H400 Zelo strupeno za vodne organizme.** H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P391 Prestreči razlito tekočino. P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/zaščito za obraz. P337-P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito tekočino. Pred uporabo pretresite. Izdelek ni združljiv z anionskimi detergenti in površinsko aktivnimi snovmi.

Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote.

Če izdelek po odprtju hranite pravilno, ohrani veljavnost, navedeno na etiketi. Ne uporabite pakiranja, če je poškodovano.

Za profesionalno uporabo.

**Čistilno sredstvo, skladno z uredbo ES št. 648/2004**

**Veljavnost:** 3 leta

**Št. serije in zapadlost:** glej navedbo na embalaži

**CE MEDICINSKI PRIPOMOČEK 0546 Evropska direktiva 93/42/EGS**

**Proizvajalec:**

GERMO s.p.a. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Tel. št.: 02 663 01  
938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

PROIZVEDENO V ITALIJI

*Opozorila se lahko razlikujejo glede na posodobitve varnostnega lista  
izdelka*